


Gebrauchsanweisung

SPRECHENDE ANALOGRAMBANDUHR MIT EINKNOPFBEDIENUNG

Basisfunktionen:

S1	(rechts oben)	Ansage der Uhrzeit
S2	(links unten)	Stundeneinstellung
S3	(rechts unten)	Minuteneinstellung

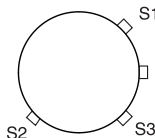

Da Minuten und Stunden bei der Einstellung sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die richtige Uhrzeit der Sprachansage leicht einstellen.

Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden über zwei verschiedene Uhrwerke und Batterien gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerenden Batterien oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

Zeigerwerk einstellen

Ziehen Sie die Krone (rechts in der Mitte) vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die aktuelle Zeit einzustellen, anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

Ansage der Uhrzeit

Betätigen sie ein mal S1 (rechts oben) und die Uhrzeit wird angesagt.

Zeit für die Sprachausgabe einstellen

Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. Stecknadel oder Büroklammer) zur Betätigung von S2 (links unten) zur STUNDENEINSTELLUNG und S3 (rechts unten) zur MINUTENEINSTELLUNG.

